



ALLEVYN[®]

Classic

Pansament adeziv din spuma poliuretanică

Sterilizat Sterilizat la radiatii Gamma. A nu se folosi daca ambalajul este deschis sau deteriorat. A se pastra in loc uscat (<25°C / 77°F). A se proteja de lumina.

Descriere

Pansamentul ALLEVYN Adhesive este format din 3 straturi: un strat perforat de contact cu plaga, un strat impermeabil cu rol in prevenirea contaminarii bacteriene iar intre acestea doua un strat impermeabil hidrocelular absorbant.

Mod de actiune

Tratamentul plagilor cu vindecare secundara, cronice sau acute, de diferite adancimi sau superficiale, plagi granulare, cu un nivel de exudat mediu sau ridicat, precum ulceretele de decubit, ulceretele membrului inferior, plagi maligne, zone donoare in transplantul de piele, ulcere micotice, ulcere diabetice ale piciorului, plagi chirurgicale si arsuri de gradul I si II. Pentru plagile necrotice poate fi folosit impreuna cu INTRASITE Gel.

ALLEVYN Adhesive poate fi folosit pe plagile infectate. Acolo unde produsul este folosit pe plagile infectate, acestea trebuie tratate conform protocolului clinic local.

Indicatii

Tratamentul plagilor cu vindecare secundara, cronice sau acute, de diferite adancimi sau superficiale, plagi granulare, cu un nivel de exudat mediu sau ridicat, precum ulceretele de decubit, ulceretele membrului inferior, plagi maligne, zone donoare in transplantul de piele, ulcere micotice, ulcere diabetice ale piciorului, plagi chirurgicale si arsuri de gradul I si II. Pentru plagile necrotice poate fi folosit impreuna cu INTRASITE Gel.

ALLEVYN Adhesive poate fi folosit pe plagile infectate. Acolo unde produsul este folosit pe plagile infectate, acestea trebuie tratate conform protocolului clinic local.

Precautii

- A nu se folosi ALLEVYN Adhesive impreuna cu agenti oxidanti precum solutii hipoclorite (ex: EUSOL) sau apa oxigenata, acestea putand sa distruga componenta de spuma poliuretanică a pansamentului.
- Ca in cazul majoritatii pansamentelor adezive, au existat persoane cu iritatii sau macerari ale tesutului din jurul plagii. Cazurile de sensibilitate la pansament au fost rare. Daca apare inrosire locala sau semne de sensibilizare, incetati folosirea produsului.
- Trebuie specificat faptul ca folosirea neadecvata a pansamentului sau schimbarea prea frecventa a acestuia, in special la pacientii cu piele sensibila, poate duce la lezarea tegumentelor.
- ALLEVYN Adhesive este un produs de unica folosinta. Daca este folosit la mai mult de un singur pacient, poate apare infectia sau contaminarea incrucisata. Deschiderea ambalajului compromite bariera sterila si de aceea orice resturi de pansament nu trebuie pastrate pentru o aplicare ulterioara.

Instructiuni de folosire

1. Curatati plaga conform protocolului clinic local.
2. Alegeti un pansament de marime potrivita. ALLEVYN Adhesive poate fi taiat pentru a se potrivi in zonele dificile. Cand taiati pansamentul, intotdeauna folositi o tehnica aseptica.
3. Pregatiti si curatati tegumentul din jurul plagii, indepartand umezeala in exces. Pilozitatea din zona trebuie inlaturata pentru a asigura un contact cat mai bun intre pansament si plaga. In cazul pielii sensibile, inaintea aplicarii pansamentului ALLEVYN Adhesive pot fi folosite tamponae SKIN-PREP.
4. Folosind o tehnica aseptica indepartati una dintre foliile protectoare ale pansamentului si fixati partea adeziva pe piele.
5. Indepartati folia de protectie ramasa si neteziti pansamentul peste plaga, fara a-l intinde, asigurandu-va ca nu se formeaza cute. Zona cu pad absorbant trebuie sa fie aderenta pe intreaga suprafata a plagii.
6. Daca ALLEVYN Adhesive a fost taiat, asigurati-va ca orice parte expusa a spumei poliuretanică este acoperita cu un pansament corespunzator. A nu se acoperi intreaga suprafata a pansamentului.
7. Atunci cand aplicati pansamentul ALLEVYN Adhesive Sacrum, pozitionati partea ingusta la cel putin 2 cm deasupra sfinterului anal, apoi neteziti pansamentul peste osul sacrat.

Frecventa schimbarii pansamentului

Pansamentul ALLEVYN Adhesive trebuie verificat conform protocolului clinic local in timpul primelor etape ale tratamentului plagii. Atunci cand este folosit pe plagile infectate, infectia trebuie verificata si tratata conform protocolului clinic local. Pansamentul are capacitatea de a actiona pe plaga pana la 7 zile, in functie de conditia plagii si a tegumentului inconjurator sau pana cand exudatul este vizibil si se apropie la mai putin de 0.5 cm de marginile padului absorbant. Daca pansamentul se aplica pe zona sacrata, poate fi lasat pe plaga pana la 5 zile, dar, datorita riscului crescut de infectie si contaminare din aceasta zona, poate fi necesara o monitorizare mai frecventa a aderentei pansamentului. Decizia de a schimba pansamentul trebuie luata tinand cont de evaluarea clinica si de protocolul clinic local.

Inlaturarea pansamentului

Pentru a inlatura pansamentul, dezlipiti un colt si trageti in lungul tegumentului (nu perpendicular pe acesta). Pansamentele sacrate trebuie inlaturate de la marginea superioara catre marginea inferioara, catre anus, pentru a minimiza riscurile transmiterii unei infectii.

Scala de pe ambalaj poate fi folosita ca si ghid in alegerea dimensiunii corespunzatoare a pansamentului si trebuie luate masurii pentru evitarea contaminarii incrucisate.

Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiuni	Disponibilitate
66000043	7.5cm x 7.5cm	Cutie de 10
66000599	10cm x 10cm	Cutie de 10
66000044	12.5cm x 12.5cm	Cutie de 10
66000045	17.5cm x 17.5cm	Cutie de 10
66000744	12.5cm x 22.5	Cutie de 10
66000046	22.5cm x 22.5cm	Cutie de 10
66000451	22cm x 22cm	Cutie de 10
66000700	17cm x 17cm	Cutie de 10

Producator

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England
Trade Marks of Smith & Nephew ©Smith & Nephew Date of issue 02/2014

Importator

Medical Ortovit srl * str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1
Telefon: (+40) 21 222.80.67 /68 /69 * 0731.493.261 * 0727.301.021
Fax: (+40) 21 222.80.72 * E-mail: office@ortovit.eu * Web: www.ortovit.eu
Magazin online www.ortovit.eu/magazin

