

De unica folosinta. Sterilizat cu abur. A nu se folosi daca pachetul este deschis sau deteriorat. A se depozita intr-un loc uscat (5-25°C). A se feri de lumina soarelui.

### Descriere

INTRASITE Gel este un hidrogel amorf transparent ce contine un polimer modificat de carboximetil celuloza, propilenglicol si apa. Produsul steril este ambalat ca doza unica, pentru o aplicare facila.

### Mod de actiune

INTRASITE Gel asigura debridarea naturala prin intermediul autolizei, rehidratand treptat tesutul necrotic. De asemenea, gelul ajuta la indepartarea crustei si exudatului. INTRASITE Gel asigura un mediu umed in plaga, nu este aderent si nu dauneaza tesuturilor sau pielii inconjuratoare plagilor.

### Indicatii

INTRASITE Gel este indicat pentru indepartarea de tesuturi devitalizate din plagi de dimensiuni si adancimi diferite (ex: escare de decubit, ulcerale piciorului, ulcere diabetice, plagi maligne, arsuri, plagile chirurgicale, arsurile prin oparire, laceratii, escoriatii, amputatii si ulcere micotice). De asemenea, gelul este indicat si in tratamentul plagilor cavitate granulare si arsuri prin iradiere.

INTRASITE Gel poate fi folosit pe plagi infectate sub supraveghere medicala.

### Instructiuni de folosire

Asigurati-va ca resturile de gel sa fie indepartate anterior terapiei cu radiatii.

1. Pregatiti zona plagii:

Indepartati pansamentul secundar.

Curatati zona plagii cu solutie salina.

2. Pregatiti ambalajul:

Indepartati capacul de protectie. Tamponati partea ingusta a pompei folosind un tampon cu antiseptic potrivit. Indepartati varful cu striatii al pompei.

3. Introduceti INTRASITE Gel in plaga. Fara sa atingeti zona plagii cu varful pompei, apasati usor pentru a distribui gelul, evitand revarsarea acestuia pe pielea inconjuratoare.

Neteziti gelul pe suprafata plagii pana la o adancime de aprox. 5mm.

Aruncati gelul nefolosit.

4. Pansati plaga:

Aplicati un pansament secundar, luand in considerare:

ETAPELE PLAGII	PANSAMENT*
Necroza	OPSITE <sup>®</sup>
	FLEXIGRID <sup>®</sup>
Crusta	ALLEVYN <sup>®</sup>
	MELOLIN <sup>®</sup>
Granulare	ALLEVYN <sup>®</sup>
	MELOLIN <sup>®</sup>
	OPSITE <sup>®</sup>
	FLEXIGRID <sup>®</sup>
Plagi cu miros neplacut	CARBONET <sup>®</sup>

5. Indepartarea gelului:

INTRASITE Gel poate fi indepartat de pe plaga prin clatirea cu solutie salina. Daca INTRASITE Gel devine dificil de indepartat, imbibati zona cu apa sterila sau solutie salina. Pe plagi necrotice sau cu crusta, este recomandat ca pansamentul sa fie schimbat la cel putin trei zile. Pe plagi granulare curate, frecventa schimbarii pansamentului depinde de conditia clinica a plagii si de volumul de exudat produs.

### Precautii

O sensibilitate cunoscuta la INTRASITE Gel sau la oricare din compusii acestuia (Propilenglicol). INTRASITE Gel trebuie folosit cu grija in apropierea ochilor, a plagilor adanci cu deschideri inguste (ex: fistule) si in cavitati unde indepartarea gelului poate fi dificila. INTRASITE Gel este strict destinat uzului extern. PERICOL DE SUFOCARE – aruncati cu grija capacul de protectie pentru a nu fi inghitit accidental.

### Disponibilitatea produsului

Cod	Canitate	Ambalare
7308	8g	Pachet de 10
7311	15g	Pachet de 10
7313	25g	Pachet de 10
66800241	25g	Pachet de 3

### Producator

Produs in Marea Britanie de catre  
**Smith & Nephew Medical Limited**, Hull HU3 2BN England.  
\*Trade Marks of Smith & Nephew ©Smith & Nephew 2007  
[www.cica-care.com](http://www.cica-care.com)

### Importator

**Medical Ortovit srl** \* str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1  
Telefon: (+40) 21 222.80.67 / 68 / 69 \* 0724240285 \* 0731493261  
Fax: (+40) 21 222.80.72 \* E-mail: [office@ortovit.eu](mailto:office@ortovit.eu) \* Web: [www.ortovit.eu](http://www.ortovit.eu)  
Magazin online [www.ortovit.eu/magazin](http://www.ortovit.eu/magazin)