

Pansament antimicrobian cu nanocristale de argint

Pansament antimicrobian cu nanocristale de argint

**Sterilizat** Sterilizat prin iradiatii Gamma. A nu se utiliza daca ambalajul este deschis sau deteriorat. De unica folosinta. A fi depozitat intr-un loc uscat (<25° C). A se evita expunerea la temperaturi mai mari de 50° C. A fi ferit de lumina.

#### Descriere

Pansamentul ACTICOAT® este o bariera antimicrobiana alcatuita din 3 straturi: un strat mijlociu absorbant din rayon/poliester, intercalat intre doua straturi externe. Straturile externe sunt constituite dintr-o retea de polietilena cu aderența scazuta, acoperita cu nanocristale de argint. ACTICOAT este un pansament absorbant care ajuta la mentinerea unui mediu umed in plaga. Stratul de contact cu plaga are o aderența scazuta, fapt ce ajuta la reducerea traumei la schimbarea pansamentului. Argintul nanocristalin asigura o bariera antimicrobiana eficienta, protejand plaga de invazia microorganismelor patogene si astfel grabind procesul de vindecare. Argintul nanocristalin este de asemenea eficienta impotriva microorganismelor prezente in plaga, reducand riscul de infectie incrucisata. Proprietatile antimicrobiene ale ACTICOAT raman eficiente pentru minimum 3 zile.

#### Indicatii pentru plaga

ACTICOAT este indicat ca bariera antimicrobiana pentru plagile de adancimi variabile, incluzand escare de decubit, ulcere varicoase, ulcere diabetice, arsuri, zone cu transplant de piele. ACTICOAT poate fi folosit pe plagile infectate. Acolo unde produsul este folosit pe plagile infectate, infectia trebuie examinata si tratata conform protocolului clinic local. In cazul in care se foloseste in combinatie cu terapia prin presiune negativa (NPWT), ACTICOAT poate fi perforat si folosit ca strat de contact cu plaga pentru o perioada de pana la 3 zile.

#### Indicatii pentru zonele de insertie a cateterelelor

ACTICOAT 5 cm x 5 cm este indicat ca bariera antimicrobiana peste zonele de insertie a cateterelelor.

ACTICOAT 5 cm x 5 cm poate fi folosit pe zonele de insertie a cateterelelor, infectate. Acolo unde produsul este folosit pe zonele de insertie a cateterelelor, infectate, infectia trebuie examinata si tratata conform protocolului clinic local.

#### Contraindicatii

- A nu se folosi la pacientii cu sensibilitate cunoscuta la argint.
- A nu se folosi in timpul procedurilor RMN.
- ACTICOAT se indeparteaza inainte de administrarea radioterapiei. Un nou pansament poate fi aplicat dupa efectuarea tratamentului.

#### Precautii

- A nu se umezi inainte de folosirea pe zonele de insertie a cateterelelor.
  - Numai pentru uz extern.
  - ACTICOAT nu este compatibil cu produse pe baza de uleiuri, precum petrolatum ( vaselina ).
  - A se evita contactul cu electrozi sau geluri conductoare in timpul masuratorilor electronice, ex: EEG si ECG.
  - A nu se folosi in cazul in care culoarea nu este una uniforma.
  - Ocazional, la aplicarea ACTICOAT, poate aparea durere tranzitorie. Aceasta poate fi redusa prin urmarirea cu atentie a instructiunilor de aplicare.
- In cazul in care durerea persista, inlaturati pansamentul si incetati folosirea produsului.
- ACTICOAT trebuie folosit la prematurii ( mai putin de 37 de saptamani de sarcina ) doar atunci cand avantajele clinice sunt mai mari ca posibilele riscuri. Nu exista date clinice in aceasta grupa de varsta si de asemenea datele clinice privind tratamentele la nou-nascuti sunt limitate.
  - ACTICOAT este un produs de unica folosinta. Daca este folosit la mai mult de un pacient, poate apare infectia sau contaminarea incrucisata. Deschiderea ambalajului pansamentului compromite bariera sterila iar pansamentul nu mai trebuie pastrat pentru o aplicare ulterioara.

#### Instructiuni de folosire pe plagi

- Acolo unde este necesar, curatarea plagii trebuie facuta conform protocolului clinic local. A NU SE FOLOSI solutie salina.
- Scoateti pansamentul ACTICOAT din ambalaj folosind o tehnica aseptica.
- Umeziti pansamentul conform protocolului clinic local ( NU folositi solutie salina ). Indepartati excesul de apa inainte de aplicare, ex: lasati pansamentul timp de 2 minute pe un camp steril.
- Taiati pansamentul in forma necesara.
- Aplicati pansamentul pe suprafata plagii.
- In cazul in care ACTICOAT se foloseste in combinatie cu terapia prin presiune negativa (NPWT), taiati un numar de fante in pansament pentru a permite trecerea libera a exsudatului.
- A se asigura cu un pansament secundar pentru a pastra mediul umed in plaga. In cazul plagilor cu nivel ridicat de exsudat este necesar un pansament secundar absorbant. Pentru acest tip de plagi nu sunt recomandate pansamentele sub forma de film.
- Pansamentul trebuie pastrat umed dar nu intr-atat sa duca la macerarea tesuturilor.
- Cand este folosit cu NPWT, materialul pentru umplerea plagii trebuie umezit si schimbat conform instructiunilor de la producator.
- Schimbati pansamentul in functie de nivelul de exsudat si de caracteristicile plagii. Pansamentul poate fi mentinut pe plaga pana la 3 zile.
- Daca nivelul de exsudat este scazut, pansamentul poate sa se usuce sau sa se lipeasca de plaga. Daca indepartarea lui este dificila, umeziti-l sau scufundati-l in apa pentru a ajuta desprinderea acestuia fara ca rana in curs de vindecare sa fie afectata.

#### Instructiuni de folosire pe zonele de insertie a cateterelelor

- Acolo unde este necesar, curatarea plagii trebuie facuta conform protocolului clinic local. A NU SE FOLOSI solutie salina.
- Scoateti pansamentul ACTICOAT din ambalaj folosind o tehnica aseptica.
- Cand ACTICOAT este folosit pe o zona de insertie a cateterului nu se umezeste.
- Taiati pansamentul in forma necesara.
- Fixati pansamentul ACTICOAT folosind un pansament secundar semiocluziv. Acesta va reduce miscarea cateterului.
- Verificati zilnic pansamentul si schimbati-l in functie de nivelul de exsudat si de starea cateterului.
- Daca pansamentul adera la zona cateterului, umeziti pansamentul pentru a ajuta desprinderea acestuia fara a afecta cateterul.

**Nota:** ACTICOAT poate produce decolorarea tranzitorie a tegumentului inconjurator.

#### Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiuni	Ambalare
66000808	5cm x 5cm	Pachet de 5
66000789	10cm x 10cm	Pachet de 5
66000791	10cm x 10cm	Pachet de 12
66000792	10cm x 20cm	Pachet de 12
66000793	20cm x 40cm	Pachet de 6
66000794	40cm x 40cm	Pachet de 6
66000795	10cm x 120cm	Pachet de 6

#### Producator

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull Hu3 2BN England  
Trade Marks of Smith & Nephew ©Smith & Nephew Date of issue 02/2013  
Patent Nos: US 5681575, 5753251, 5770255, 5837275 [www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

#### Importator

Medical Ortovit srl \* str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1  
Telefon: (+40) 21 222.80.67 / 68 / 69 \* 0731.493.261 \* 0727.301.021  
Fax: (+40) 21 222.80.72 \* E-mail: [office@ortovit.eu](mailto:office@ortovit.eu) \* Web: [www.ortovit.eu](http://www.ortovit.eu)  
Magazin online [www.ortovit.eu/magazin](http://www.ortovit.eu/magazin)