

cu SILCRYST Nanocrystals

Pansament antimicrobian cu nanocristale de argint

Sterilizat cu radiatii gamma. A nu se utiliza daca ambalajul este deschis sau deteriorat. De unica folosinta. A nu se resteriliza. A fi depozitat intr-un loc uscat (<25° C / 77° F). A se evita expunerea la temperaturi mai mari de 50° C / 120° F. A fi ferit de lumina.

Descriere

Pansamentul ACTICOAT[®] Flex 3 este alcătuit dintr-un strat de poliester flexibil cu aderența scăzută, acoperit cu nanocristale de argint. ACTICOAT Flex 3 este un pansament foarte flexibil care urmărește liniile corpului pentru a menține contactul cu suprafața plăgii. Pansamentul are o aderență scăzută, astfel minimizând traumatizarea plăgii în timpul schimbării acestuia. Nanocristalele de argint creează o barieră antimicrobiană eficientă față de contaminarea microbiană. Astfel plaga este protejată de microorganismii patologici invazivi, fiindu-i grabită vindecarea. Nanocristalele de argint sunt de asemenea eficiente împotriva microorganismelor prezente în plaga. Proprietățile de barieră antimicrobiană a pansamentului ACTICOAT Flex 3 raman eficiente minimum 3 zile.

Indicatii

ACTICOAT Flex 3 este indicat ca pansament cu bariera antimicrobiană pe plăgi cu adancimi diferite, precum arsuri, zone donoare si receptoare de transplant de piele, ulcerul de decubit, ulcerul varicos, ulcerul diabetic si plăgi chirurgicale.

ACTICOAT Flex 3 poate fi folosit pe plăgi infectate, caz în care acestea trebuie evaluate si tratate conform protocolului local. ACTICOAT Flex 3 poate fi folosit ca un strat de contact cu plaga în combinație cu NPWT (Negative Pressure Wound Therapy = terapia plagilor prin presiune negativă) până la 3 zile.

Contraindicatii

- A nu se utiliza la pacientii cu sensibilitate la argint.
- A nu se utiliza la pacienti în timpul efectuării RMN-ului.
- A se îndepărta anterior administrării terapiei prin radiatii. După fiecare tratament poate fi aplicat un nou pansament.

Precautii

- Strict pentru uz extern (a nu fi aplicat pe organe expuse).
- ACTICOAT Flex 3 nu este compatibil cu produse pe baza de ulei precum vaselina.
- Este posibil ca ACTICOAT Flex 3 sa nu fie compatibil cu agentii antimicrobieni locali.
- Evitati contactul cu electrozi sau geluri conductoare în timpul masurarilor electronice (ex: EKG, EEG).
- La aplicarea pansamentului ACTICOAT Flex 3 se poate simți o durere tranzitorie. Dacă aceasta persista, înlăturați pansamentul. Pentru a atenua durerea, aplicați un pansament nou folosind un produs hidrogel, conform descrierii de mai jos. Dacă durerea persista, înlăturați pansamentul si încetați tratamentul.
- A se folosi ACTICOAT Flex 3 la prematurii (mai puțin de 37 de săptămâni de sarcină) doar atunci când avantajele clinice sunt mai mari ca posibilele riscuri. Nu există date clinice în această grupă de vârstă si de asemenea datele clinice privind tratamentele la nou-născuții sunt limitate.
- ACTICOAT Flex 3 este un produs de unica folosință. Dacă este folosit la mai mult de un pacient, poate apărea infecția sau contaminarea încrucișată. În plus proprietățile antimicrobiene ale produsului pot fi compromise. Deschiderea ambalajului pansamentului compromise bariera sterilă iar pansamentul nu mai trebuie pastrat pentru o aplicare ulterioară.

Instructiuni de folosire

- Acolo unde este necesar, curățarea plăgii trebuie făcută conform protocolului clinic local. A NU SE FOLOSI soluție salină.
- Scoateți pansamentul ACTICOAT Flex 3 din ambalaj folosind o tehnică aseptică.
- Taiati pansamentul în forma necesară. Atunci când este folosit cu bandaj compresiv, pansamentul trebuie tăiat conform dimensiunilor plăgii.
- Pansamentul se umezește conform protocolului clinic local. Se scufundă complet în soluție si apoi se stoarce ușor (A NU SE FOLOSI CU SOLUȚIE SALINĂ). Înainte de aplicare lasați să se scurgă apa în exces. Ca alternativă, se poate folosi un strat subțire de hidrogel (ex: INTRASITE Gel) care poate fi aplicat direct pe plaga si/sau pe pansament.
- Atunci când este folosit cu terapie prin presiune negativă, materialul de umplere a plăgii trebuie umezit si schimbat conform instructiunilor producătorului.
- Fără a întinde pansamentul, aplicați ACTICOAT Flex 3 pe plaga, asigurându-va că marginele nu sunt încrețite. Pansamentul trebuie aplicat astfel încât direcția în care are elasticitate să fie "în lungul" membrului, pentru a permite mișcarea.
- ACTICOAT Flex 3 poate fi folosit pentru a captuși plăgi.
- Fixati pansamentul ACTICOAT Flex 3 folosind benzi de fixare suplimentară sau terapie prin compresie care vor păstra un mediu umed în plaga. În cazul plagilor cu un nivel mare de exudat se poate folosi un pansament absorbant secundar. ACTICOAT Flex 3 permite transferul exudatului direct în pansamentul absorbant secundar.
- Pansamentul ACTICOAT Flex 3 trebuie pastrat umed, dar nu atât de umed încât să permită macerarea pielii.
- Schimbați pansamentul în funcție de nivelul de exudat si de caracteristicile plăgii. Pansamentul poate fi menținut pe plaga până la 3 zile.
- Atunci când folosiți ACTICOAT Flex 3 cu bandaj compresiv, verificați regulat întregul sistem de pansamente si schimbați-le doar dacă exudatul a pătruns prin toate straturile.
- În cazul unui nivel mare de exudat este posibil să fie necesar si un pansament absorbant non-oclusiv adițional.
- În cazul în care pansamentul se usucă sau se lipeste de plaga, umeziți-l sau scufundați-l în apă pentru a ajuta îndepărtarea acestuia fără ca rana în proces de vindecare să fie afectată.

Nota: Pansamentul ACTICOAT Flex 3 poate provoca decolorarea tranzitorie a pielii din jur.

Nota: Culoarea pansamentului poate varia dar acest lucru nu îi afectează performanța.

Disponibilitatea produsului

| Cod | Dimensiuni | Disponibilitate |
|----------|--------------|-----------------|
| 66800396 | 5cm x 5cm | Cutie de 5 |
| 66800398 | 10cm x 10cm | Cutie de 5 |
| 66800399 | 10cm x 10cm | Cutie de 12 |
| 66800409 | 10cm x 20cm | Cutie de 12 |
| 66800419 | 20cm x 40cm | Cutie de 6 |
| 66800432 | 40cm x 40cm | Cutie de 6 |
| 66800435 | 10cm x 120cm | Cutie de 6 |
| 66801290 | 4cm x 15cm | Cutie de 5 |
| 66801291 | 4cm x 25cm | Cutie de 5 |
| 66801292 | 4cm x 35cm | Cutie de 5 |
| 66801293 | 20cm x 20cm | Cutie de 5 |

Importator

Medical Ortovit srl * str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1
Telefon: (+40) 21 222.80.67 /68 /69 * 0731.493.261 * 0727.301.021
Fax: (+40) 21 222.80.72 * E-mail: office@ortovit.eu * Web: www.ortovit.eu
Magazin online www.ortovit.eu/magazin