

Sterilizat cu radiatii gamma. A nu se utiliza daca ambalajul este deschis sau deteriorat. De unica folosinta. A nu se resteriliza. A fi depozitat intr-un loc uscat (<25° C / 77° F). A se evita expunerea la temperaturi mai mari de 50° C / 120° F. A fi ferit de lumina.

Descriere

Pansamentul ACTICOAT® Flex 7 este alcătuit dintr-un strat de poliester flexibil cu un adeziv atraumatic, acoperit cu nanocristale de argint. ACTICOAT Flex 7 este un pansament foarte flexibil care urmareste liniile corpului pentru a mentine contactul cu suprafata plagii. Pansamentul are un adeziv atraumatic, astfel minimizand traumatizarea plagii in timpul schimbarii acestuia. Nanocristalele de argint creeza o bariera antimicrobiana eficienta fata de contaminarea microbiana. Astfel plaga este protejata de microorganismele patologice invazive, fiindu-i grabita vindecarea. Nanocristalele de argint sunt de asemenea eficiente impotriva microorganismelor prezente in plaga. Proprietatile de bariera antimicrobiana a pansamentului ACTICOAT Flex 7 raman eficiente minimum 7 zile.

Indicatii

ACTICOAT Flex 7 este indicat ca pansament cu bariera antimicrobiana pe plagi cu adancimi diferite, precum arsuri, zone donoare si receptoare de transplant de piele, ulcerul de decubit, ulcerul varicos, ulcerul diabetic si plagi chirurgicale.

ACTICOAT Flex 7 poate fi folosit pe plagi infectate, caz in care acestea trebuie evaluate si tratate conform protocolului local. ACTICOAT Flex 7 poate fi folosit ca un strat de contact cu plaga in combinatie cu NPWT (Negative Pressure Wound Therapy = terapia plagilor prin presiune negativa) pana la 7 zile.

Contraindicatii

A nu se utiliza la pacientii cu sensibilitate la argint.

A nu se utiliza la pacientii in timpul efectuării RMN-ului.

A se indeparta anterior administrării terapiei prin radiatii. Dupa fiecare tratament poate fi aplicat un nou pansament.

Precautii

Strict pentru uz extern (a nu fi aplicat pe organe expuse).

ACTICOAT Flex 7 nu este compatibil cu produse pe baza de ulei precum vaselina.

Este posibil ca ACTICOAT Flex 7 sa nu fie compatibil cu agenti antimicrobieni locali.

Evitati contactul cu electrozi sau geluri conductoare in timpul masurarilor electronice (ex: EKG, EEG).

La aplicarea pansamentului ACTICOAT Flex 7 se poate simti o durere tranzitorie. Daca aceasta persista, inlaturati pansamentul. Pentru a atenua durerea, aplicati un pansament nou folosind un produs hidrogel, conform descrierii de mai jos. Daca durerea persista, inlaturati pansamentul si incetati tratamentul.

A se folosi ACTICOAT Flex 7 la prematuri (mai putin de 37 de saptamani de sarcina) doar atunci cand avantajele clinice sunt mai mari ca posibilele riscuri. Nu exista date clinice in aceasta grupa de varsta si de asemenea datele clinice privind tratamentele la nou-nascutii sunt limitate.

Instructiuni de folosire

Scoateti pansamentul ACTICOAT Flex 7 din ambalaj folosind o tehnica aseptica.

Taiati pansamentul in forma necesara. Atunci cand este folosit cu bandaj compresiv, pansamentul trebuie taiat conform dimensiunilor plagii.

Pentru a umezi pansamentul, scufundati-l in apa distilata si storceti-l usor (NU FOLOSITI SER FIZIOLOGIC). Inainte de aplicare lasati sa se scurga apa in exces. Ca alternativa la umezirea cu apa se poate folosi un strat subtire de produs hidrogel (ex: INTRASITE Gel) care poate fi aplicat direct pe plaga si/sau pe pansament.

Atunci cand este folosit cu terapie prin presiune negativa, materialul de umplere a plagii trebuie umezit si schimbat conform instructiunilor producatorului.

Fara a intinde pansamentul, aplicati ACTICOAT Flex 7 pe plaga, asigurandu-va ca marginile nu sunt incretite. Pansamentul trebuie aplicat astfel incat directia in care are elasticitate sa fie "in lungul" membrului, pentru a permite miscarea.

ACTICOAT Flex 7 poate fi folosit pentru a captusi plagi.

Fixati pansamentul ACTICOAT Flex 7 folosind benzi de fixare suplimentara sau terapie prin compresie care vor pastra un mediu umed in plaga. In cazul plagilor cu un nivel mare de exudat se poate folosi un pansament absorbant secundar. ACTICOAT Flex 7 permite transferul exudatului direct in pansamentul absorbant secundar.

Pansamentul ACTICOAT Flex 7 trebuie pastrat umed, dar nu atat de umed incat sa permita macerarea pielii.

Schimbatii pansamentul in functie de nivelul de exudat si de caracteristicile plagii. Pansamentul poate fi mentionate pe plaga pana la 7 zile.

Atunci cand folositi ACTICOAT Flex 7 cu bandaj compresiv, verificati regulat intregul sistem de pansamente si schimbati-le doar daca exudatul a patruns prin toate straturile. In cazul unui nivel mare de exudat este posibil sa fie necesar si un pansament absorbant non-oclusiv additional.

In cazul in care pansamentul se usuca sau se lipeste de plaga, umeziti-l sau scufundati-l in apa pentru a ajuta indepartarea acestuia fara ca rana in proces de vindecare sa fie afectata.

Nota: Pansamentul ACTICOAT Flex 7 poate provoca decolorarea tranzitorie a pielii din jur.

Nota: Culoarea pansamentului poate varia dar acest lucru nu ii afecteaza performanta.

Disponibilitatea produsului

| Cod | Dimensiuni | Disponibilitate |
|----------|---------------|-----------------|
| 66800395 | 5cm x 5cm | Cutie de 5 |
| 66800397 | 10cm x 12.5cm | Cutie de 5 |
| 66800420 | 15cm x 15cm | Cutie de 5 |
| 66800400 | 20cm x 40cm | Cutie de 6 |
| 66800401 | 40cm x 40cm | Cutie de 6 |
| 66800545 | 2.5cm x 60cm | Cutie de 5 |

Producator

Produs in Marea Britanie de catre

Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England.

Trade Marks of Smith & Nephew ©Smith & Nephew 2007

www.cica-care.com

Importator

Medical Ortovit srl * str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1

Telefon: (+40) 21 222.80.67 / 68 / 69 * 0724240285 * 0731493261

Fax: (+40) 21 222.80.72 * E-mail: office@ortovit.eu * Web: www.ortovit.eu

Magazin online www.ortovit.eu/magazin