

# ALLEVYN<sup>o</sup> GENTLE BORDER

Pansament adeziv din spuma hidrocelulara absorbanta cu gel siliconic



## Descriere

Pansamentul ALLEVYN Gentle Border are o avansata compozitie tristratificata, precum urmeaza: un strat absorbant hidrocelular intercalat intre un strat de contact cu plaga din gel siliconic adeziv, perforat, si un strat exterior extern, impermeabil pentru apa dar permeabil pentru vapori.

ALLEVYN Gentle Border este un pansament din spuma poliuretanică hidrocelulară cu adeziv pe baza de gel siliconic care asigura un mediu umed optim pentru vindecare. Se poate folosi pe plagile cu cantitati de exudat moderat sau mari. Stratul de contact cu plaga din gel siliconic adeziv este delicat chiar si cu pielea foarte fragila, ceea ce face ca pansamentul sa fie usor de aplicat, repositionat si indepartat. Pansamentul are un pad absorbant din spuma hidrocelulara. Stratul de film extern ajuta la prevenirea contaminarii bacteriene a plagii si este rezistent la dus. Cu toate acestea, pansamentul nu trebuie scufundat in apa.

## Indicatii

1. Tratament prin vindecare secundara a plagilor granulare, superficiale, plagii exsudative cronice si acute, plagii de adancimi variabile precum:

- ulcerul de presiune
- ulcerul piciorului
- ulcerul piciorului diabetic
- plagii chirurgicale
- arsuri de gradul I si II
- zone donoare
- laceratii
- ulcere micotice

2. Se poate utiliza pe pielea intacta in prevenirea ulcerului de presiune inclusiv pe ulcerule datorate dispozitivelor medicale utilizate in protocolul de prevenire a acestora.

**Precautii:** In cazul in care pansamentul se foloseste sub dispozitive medicale in apropierea gurii sau nasului, este recomandata verificarea frecventa deoarece se poate produce umiditate, caz in care este afectata aderența pansamentului ducand la miscarea acestuia. Pentru mai multe informatii va rugam vizitati [www.allevyn.com](http://www.allevyn.com)

## Instructiuni de folosire

1. Curatati plaga conform protocolului clinic local. Asigurati-va ca pielea din jurul plagii este curata, uscata iar excesul de par este indepartat.

2. Alegeți o dimensiune adecvata. Asigurati-va ca padul absorbant acopera toata suprafata plagii sau zona pe care doriti sa o protejati. Scala de pe ambalaj este pentru ghidaj.

3. Indepartati prima hartie de protectie si fixati partea adeziva a pansamentului pe piele. Daca aplicati pansamentul Sacrum, pozitionati capatul ingust la cel putin 2 cm mai sus de sfincterul anal, apoi neteziti pansamentul peste sacrum.

4. Neteziti pansamentul peste plaga indepartand restul de material de protectie si asigurati-va ca pansamentul este aderent la intreaga suprafata a plagii.

5. Neteziti marginile pansamentului. Asigurati-va ca nu exista cute care pot compromite sigilarea. Pansamentul poate fi repositionat daca este necesar.

6. ALLEVYN Gentle Border poate fi taiat, in special daca este folosit pe zona calcailui, a cotului si alte zone dificil de pansat. Folositi o tehnica aseptica la taierea pansamentului.

Taierea pansamentului va compromite bariera antibacteriana si impermeabilitatea acestuia. Asigurati-va ca zonele de spuma expusa sunt acoperite cu un film, evitand acoperirea in totalitate a pansamentului. Pentru indrumari suplimentare privind aplicarea pansamentelor Heel si Sacrum, va rugam sa consultati diagrama de pe ambalajul pansamentului.

**Observatii:** Cand este folosit pentru prevenirea ulcerului de presiune, verificati frecvent daca pielea este deteriorata prin ridicarea unui colt al pansamentului, apoi repositionati-l.

## Indepartarea pansamentului

Pentru a indeparta ALLEVYN Gentle Border ridicati un colt al pansamentului si trageți ușor pana este complet indepartat de pe plaga.

## Frecventa schimbării pansamentului

In timpul primelor etape ale tratamentului plagii, ALLEVYN Gentle Border trebuie verificat frecvent. Pansamentul poate fi lasat pe plaga pana la 7 zile exceptie facand zona sacrata care necesita schimbarea pansamentului la cel mult 5 zile. Pansamentul trebuie schimbat in functie de conditia plagii si a pielii inconjuratoare sau pana in momentul in care exudatul este vizibil si se apropie de marginea padului absorbant pana la 0.5 cm. Decizia de schimbare a pansamentului trebuie luata in functie de evaluarea clinica si de protocolul clinic local.

## Precautii

• In cazul in care pansamentul se foloseste sub dispozitive medicale in apropierea gurii sau nasului, este recomandata verificarea frecventa deoarece se poate produce umiditate, caz in care este afectata aderența pansamentului ducand la miscarea acestuia

• Utilizarea ALLEVYN Life ca parte a protocolului de prevenire a ulcerului de presiune nu exclude necesitatea continuarii si urmaririi unui protocol complex de prevenire ( ex. mobilizare regulata, saltele speciale si ingrijirea tegumentului )

• Nu folositi acest pansament pentru a fixa alte dispozitive medicale deoarece adezivul este delicat

• Incețati folosirea produsului in cazul aparitiei inrosirii sau sensibilizarii zonei

• Taierea pansamentului va compromite bariera antibacteriana si impermeabilitatea acestuia

• Nu scufundati pansamentul in apa

• Nu utilizati ALLEVYN Gentle Border cu agenti oxidanti precum solutii hipoclorite ( ex: EUSOL ) sau apa oxigenata, acestea putand sa distruga componentul absorbant din poliuretan al pansamentului

• Produs de unica folosinta. Daca este folosit la mai mult de un singur pacient, poate apare infectia sau contaminarea incrucisata

• Deschiderea ambalajului compromite bariera sterila si de aceea orice resturi de pansament nu trebuie pastrate pentru o aplicare ulterioara

• Daca este folosit pe plagii infectate, infectia trebuie verificata si tratata conform protocolului clinic local

## Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiuni	Ambalare
66800269	7,5cm x 7,5cm	Pachet de 10
66800270	10cm x 10cm	Pachet de 10
66800900	10cm x 20cm	Pachet de 10
66800264	10cm x 25cm	Pachet de 10
66800265	15cm x 30cm	Pachet de 10
66800272	12,5cm x 12,5cm	Pachet de 10
66800975	15cm x 15cm	Pachet de 10
66800273	17,5cm x 17,5cm	Pachet de 10
66800897	Sacrum 16,8cm x 17,1cm	Pachet de 6
66800898	Sacrum 16,8cm x 17,1cm	Pachet de 10
66800959	Multiste 17,1cm x 17,9cm	Pachet de 10
66801031	Sacrum 21,6cm x 23cm	Pachet de 10
66800506	Heel 23cm x 23,2cm	Pachet de 5

## Producator

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull Hu3 2BN England

Trade Marks of Smith & Nephew ©Smith & Nephew Date of issue 10/2017



## Importator

Medical Ortovit srl \* str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1

Telefon: (+40) 21 222.80.67 /68 /69 \* 0731.493.261 \* 0727.301.021

Fax: (+40) 21 222.80.72 \* E-mail: [office@ortoviteu.com](mailto:office@ortoviteu.com) \* Web: [www.ortoviteu.com](http://www.ortoviteu.com)

Magazin online [www.ortoviteu.com/magazin](http://www.ortoviteu.com/magazin)

**DECLARATIE DE CONFORMITATE**

Prin prezenta declaram ca produsul ALLEVYN® GENTLE BORDER respecta standardele impuse de Directiva Dispozitivelor Medicale (93/42/EEC)

**ADRESA PRODUCATORULUI :**

Smith and Nephew Medical Limited  
101 Hessle Road  
Hull  
HU3 2BN  
United Kingdom

**CLASA DE DISPOZITIVE : IIb steril**

**STANDARDE DE CALITATE : BS EN ISO 14971: 2012, BS EN ISO 11135:1-2014, BS EN ISO 9001: 2008, BS EN 13726-2: 2002, BS EN ISO 13485: 2012, BS EN 13726-3: 2003, BS EN ISO 11607-1: 2009, BS EN 13726-4:2003, BS EN 13726-1:2002, BS EN 15223-1: 2012, BS EN ISO 780: 1999, BS EN 556-1:20011 AC:2006, BS EN 1041: 2008, BS EN ISO 10993-5:2009, BS EN ISO 10993:3-2009, BS EN ISO 10993-10:2013, BS EN ISO 10993-18: 2009, BS EN ISO 10993-1:2009/ AC:2010, BS EN ISO 10993-2:2006, BS EN ISO 10993-7:2008/ AC:2009, BS EN ISO 10993-12:2012, BS EN ISO 14644-1:1999/AC: 2001**

Ne obligam sa respectam toate cerintele impuse de standardele mai sus mentionate si sa revedem periodic toate procedurile necesare pentru ca sistemul de calitate sa ramana adecvat si eficient

**GARANTIE**

Medical Ortovit garanteaza in numele producatorului calitatea produselor ALLEVYN® GENTLE BORDER, acestea fiind fabricate in conditii de inalta exigenta tehnica si respectand atat normele ISO specifice cat si cerintele impuse de Directiva Dispozitivelor Medicale (93/42/EEC).

Pentru a obtine rezultatele terapeutice scontate produsul trebuie sa fie folosit conform instructiunilor de pe verso.

Data, semnatura si stampila

