

ACTICOAT®

cu Nanocristale SILCRYST®

Pansament antimicrobian cu nanocristale de argint

Descriere

Pansamentul ACTICOAT® este o bariera antimicrobiana alcătuită din 3 straturi: un strat mijlociu absorbant din rayon/poliester, intercalat între două straturi externe. Straturile externe sunt constituite dintr-o rețea de polietilena cu aderența scăzută, acoperită cu nanocristale de argint. ACTICOAT este un pansament absorbant care ajută la menținerea unui mediu umed în plagă. Stratul de contact cu plaga are o aderență scăzută, fapt ce ajută la reducerea traumei la schimbarea pansamentului. Argintul nanocristalin asigură o barieră antimicrobiana eficientă, protejând plaga de invazia microorganismelor patogene și astfel grabind procesul de vindecare. Argintul nanocristalin este de asemenea eficient împotriva microorganismelor prezente în plagă, reducând riscul de infecție încrucișată. Proprietățile antimicrobiene ale ACTICOAT® rămân eficiente pentru minimum 3 zile.

Indicații pentru plagi:

ACTICOAT® este indicat ca bariera antimicrobiana pentru plagile de adancimi variabile, incluzand escare de decubit, ulcere varicoase, ulcere diabetice, arsuri, zone cu transplant de piele. ACTICOAT poate fi folosit pe plagile infectate. Acolo unde produsul este folosit pe plagile infectate, infecția trebuie examinată și tratată conform protocolului clinic local. În cazul în care se folosește în combinație cu terapia prin presiune negativă (NPWT), ACTICOAT poate fi tăiat și folosit ca strat de contact cu plaga pentru o perioadă de până la 3 zile.

Contraindicații

- A nu se folosi la pacienții cu sensibilitate cunoscută la argint.
- A nu se folosi în timpul procedurilor RMN.
- ACTICOAT se îndepărtează înainte de administrarea radioterapiei. Un nou pansament poate fi aplicat după efectuarea tratamentului.

Precauții

- Numai pentru uz extern.
- Nu umeziți în prealabil înainte de utilizare pe locurile de inserare a cateterului.
- ACTICOAT nu este compatibil cu produse pe baza de uleiuri, precum petrolatum (vaselina).
- A se evita contactul cu electrozi sau geluri conductoare în timpul măsurătorilor electronice, ex: EEG și ECG.
- A nu se folosi în cazul în care culoarea nu este una uniformă.
- Ocazional, la aplicarea ACTICOAT, poate apărea durere tranzitorie. Aceasta poate fi redusă prin urmărirea cu atenție a instrucțiunilor de aplicare. În cazul în care durerea persistă, inițierea pansamentului și încetarea folosirii produsului.
- ACTICOAT poate fi utilizat la sugarii prematurii (mai puțin de 37 de săptămâni de sarcină) doar atunci când avantajele clinice sunt mai mari ca posibilele riscuri. Nu există date clinice în această grupă de vârstă și de asemenea datele clinice privind tratamentele la nou-născuții sunt limitate. ACTICOAT este un produs de unică folosință. Dacă este folosit la mai mult de un pacient, poate apărea infecția sau contaminarea încrucișată.
- Deschiderea ambalajului pansamentului compromite bariera sterilă iar pansamentul nu mai trebuie păstrat pentru o aplicare ulterioară.

Instrucțiuni de folosire

- Acolo unde este necesar, curățarea plăgii trebuie făcută conform protocolului clinic local. A NU SE FOLOSII soluție salină.
- Scoateți pansamentul ACTICOAT din ambalaj folosind o tehnică aseptică.
- Umeziți pansamentul conform protocolului clinic local (NU folosiți soluție salină). Îndepărtați excesul de apă înainte de aplicare, ex: lăsați pansamentul timp de 2 minute pe un câmp steril.
- Tăiați pansamentul în forma necesară.
- Aplicați pansamentul pe suprafața plăgii.
- În cazul în care ACTICOAT se folosește în combinație cu terapia prin presiune negativă (NPWT), tăiați un număr de fante în pansament pentru a permite trecerea liberă a exsudatului.
- A se asigura cu un pansament secundar pentru a păstra mediul umed în plagă. În cazul plăgilor cu nivel ridicat de exsudat este necesar un pansament secundar absorbant. Pentru acest tip de plagi nu sunt recomandate pansamentele sub formă de film.
- Pansamentul trebuie păstrat umed dar nu într-un aluat să ducă la macerarea țesuturilor.
- Când este folosit cu NPWT, materialul pentru umplerea plăgii trebuie umezit și schimbat conform instrucțiunilor de la producător.
- Schimbați pansamentul în funcție de nivelul de exsudat și de caracteristicile plăgii. Pansamentul poate fi menținut pe plagă până la 3 zile.
- În cazul în care pansamentul se usucă sau aderă la plagă, umeziți pansamentul pentru a facilita îndepărtarea pansamentului și pentru a evita întreruperea procesului de vindecare a plăgii.

NOTA: ACTICOAT poate determina colorarea temporară a pielii din jur.

Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiuni	Ambalare
66000808	5cm x 5cm	Pachet de 5
66000789	10cm x 10cm	Pachet de 5
66000791	10cm x 10cm	Pachet de 12
66000792	10cm x 20cm	Pachet de 12
66000793	20cm x 40cm	Pachet de 6
66000794	40cm x 40cm	Pachet de 6
66000795	10cm x 120cm	Pachet de 6



18202077 28359

Producător

Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN England
 Marci comerciale ale Smith & Nephew ©Smith & Nephew Data emiterii 02/2013
 Patent: US 5681575, 5753251, 5770255, 5837275 www.smith-nephew.com

Importator

Medical Ortovit srl * str. Miron Costin nr. 8, 011098 București, sector 1
 Telefon: (+40) 21 222.80.67 /68 /69 * 0731.493.261 * 0727.301.021
 Fax: (+40) 21 222.80.72 * E-mail: office@ortovit.eu * Web: www.ortovit.eu
 Magazin online www.ortovit.eu/magazin

