

## Pansament cu alginat de calciu

### Descriere

Pansamentul ALGISITE M cu alginat de calciu este alcătuit din fibre de alginat ce formează un material netesut gros și foarte absorbant. Procesul de prelucrare reduce pierderea de fibre și îl mărește rezistența.

### Mod de actiune

Prezența umidității, precum exsudatul din plagă, determină gelificarea pansamentului ALGISITE M, reținând excesul de fluid absorbit din plagă. Indicații Pentru tratamentul ulcerului de presiune și a ulcerului venos cu cantități medii și mari de exsudat. Pentru facilitarea controlului sângerărilor minore.

### Contraindicatii

A nu se folosi la pacienții cu alergii cunoscute la pansamentele cu alginat de calciu.

### Precautii

- Verificați ca pansamentele introduse în sinusuri, etc. să fi fost îndepărtate.
  - Chiar dacă pansamentul ALGISITE M poate fi folosit în tratamentul plăgilor predispuse la sângerare minoră, nu este conceput pentru a fi utilizat ca burete chirurgical hemostatic sau pentru a realiza hemostaza în plăgile cu sângerare mare.
  - În cazuri foarte rare, folosirea pansamentelor cu alginat de calciu pe suprafețe mari a fost asociată cu hipercalcemia.
  - Trebuie verificat dacă apar semne de iritație, macerație, hipergranulație sau sensibilizare. În cazul în care apare unul dintre aceste semne trebuie întreruptă utilizarea.
  - Dacă plaga devine infectată, infecția trebuie tratată conform protocolului clinic local.
  - Deschiderea ambalajului compromite bariera sterilă și de aceea orice resturi de pansament nu trebuie pastrate pentru o aplicare ulterioară.
  - Pansamentul nu poate fi reutilizat. Poate apărea contaminarea încrucișată iar terapia poate fi ineficientă.
- ALGISITE M este destinat exclusiv utilizării profesionale.

### Instrucțiuni de folosire

1. Curățați plaga conform protocoalelor clinice locale.
2. Pansamentele ALGISITE M trebuie aplicat folosind o tehnică adecvată. Alegeți un pansament care să fie puțin mai mare decât plaga și aplicați-l în strans contact cu plaga astfel încât să acopere întreaga suprafață. Pansamentul nu trebuie să depășească marginile plăgii, astfel încât orice parte în excelență trebuie tăiată sau plăiată peste zona plăgii. Dacă plaga este adâncă sau cu buzunăre, benzile de alginat pot fi cea mai bună alegere.
3. Acoperiți cu un pansament adecvat. Alginatul va absorbi exsudatul și formează un gel hidrofilic pe suprafața plăgii. Exsudatul se evaporă din gelul format iar pansamentul secundar nu trebuie să blocheze acest proces în cazul în care exsudatul este dens.

### Frecvența schimbării pansamentului

Frecvența schimbării pansamentului depinde de tipul și condiția plăgii. În mod normal, în cazul plăgilor cu nivel ridicat de exsudat, pansamentele trebuie schimbate zilnic, trecând apoi la schimbare de două ori pe săptămână pe măsura ce procesul de vindecare avansează. Schimbați pansamentul dacă exsudatul trece prin acesta sau dacă pansamentul secundar devine saturat.

### Înlăturarea pansamentului

Pentru a înlătura pansamentul ALGISITE M folosiți pense sau mâni. Îndepărtați cu grijă pansamentul ridicându-l de pe suprafața plăgii - în general, rezistența ridicată la umiditate permite să fie scos într-o singură bucată. Dacă nivelul exsudatului este foarte scăzut, pansamentul poate adera la plagă. Dacă pansamentul este dificil de îndepărtat, umeziiți-l în prealabil cu soluție salină.

Pansamentele se aruncă conform protocoalelor clinice locale sau igienice.

Dacă în timpul folosirii credeți că a survenit un incident serios, vă rugăm să-l raportați producătorului sau autorității competente. [Complaints@Smith-Nephew.com](mailto:Complaints@Smith-Nephew.com)

### Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiune	Disponibilitate
66000519	5cm x 5cm	Carton of 10
66000520	10cm x 10cm	Carton of 10
66000521	15cm x 20cm	Carton of 10
66000522	2cm x 30cm	Carton of 5
66000718	10cm x 10cm	Carton of 3
66000719	15cm x 15cm	Carton of 3



18601873 36074

### Producator

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England  
 \*Mărci comerciale ale Smith & Nephew. ©Smith & Nephew  
 Data emiterii 09/2022. Revizua 01. [www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

Smith & Nephew Operations B.V.  
 Bloemlaan 2, 2132 NP Hoofddorp, Netherlands

### Importator

Medical Ortovit srl \* str. Miron Costin nr. 8, 011098 București, sector 1  
 Telefon: (+40) 21 222.80.67 / 68 / 69 \* 0731.493.261 \* 0727.301.021  
 Fax: (+40) 21 222.80.72 \* E-mail: [office@ortovit.eu](mailto:office@ortovit.eu) \* Web: [www.ortovit.eu](http://www.ortovit.eu)  
 Magazin online [www.ortovit.eu/magazin](http://www.ortovit.eu/magazin)

