

# ALLEVYN GENTLE BORDER

smith&nephew

Pansament adeziv din spuma hidrocelulara absorbanta, cu gel siliconic

## Descriere

Pansamentele ALLEVYN GENTLE BORDER au o structura cu strat triplu care combina un tampon hidrocoloid absorbant intercalat intre un strat adeziv din gel siliconic cu o suprafața perforata de contact cu plaga si o pelicula superioara rezistenta la apa extrem de permeabila.

## Mod de functionare

Pansamentele ALLEVYN GENTLE BORDER faciliteaza gestionarea fluidelor cu volum ridicat si promoveaza un mediu umed de vindecare a plagilor care este optim pentru vindecare. Acest lucru ajuta, de asemenea, la reducerea riscului de macerare. Stratul adeziv din gel siliconic cu o suprafața perforata de contact cu plaga permite exsudatului sa treaca prin acesta pana la stratul din spuma. Stratul adeziv din gel siliconic este bland, adecvat pentru utilizarea pe pielea fragila si face ca pansamentul sa fie usor de aplicat, de repositionat si de inlaturat. stratul din spuma hidrocelulara absoarbe exsudatul din plaga. Pelicula superioara care lasa aerul sa circule permite evaporarea si ajuta la prevenirea contaminarii cu fluide si bacterii a plagii si este rezistenta la apa.

## Indicatii

1. Gestionarea plagilor superficiale, granulate, plagilor exsudative cronice si acute, plagilor de grosime completa si partiala, inclusiv:

- Escare de decubit
- Escare la nivelul picioarelor
- Ulceratii ale piciorului diabetic
- Plagi chirurgicale
- Arsurile de gradul unu si doi
- Situsuri donoare
- Rupturi tegumentare
- Ulceratii fungice

2. Prevenirea escarelor de decubit pe pielea intacta, inclusiv ulceratiile de presiune cauzate de dispozitive medicale, in cadrul protocolului de prevenire a ulceratiilor.

**Masura de precautie: Trebuie sa fii atenti cand folositi pansamentul sub dispozitive medicale aproape de nas si gura, unde umezeala se poate acumula si afecta aderența, fapt care duce la deplasarea pansamentului.** Pentru mai multe informatii vizitati: [www.allewyn.com](http://www.allewyn.com)

## Precautii

- Trebuie acordata o atentie deosebita cand folositi pansamentul sub dispozitive medicale in apropierea nasului si a gurii, unde umezeala se poate acumula si afecta aderența, fapt care duce la deplasarea pansamentului.
- Utilizarea pansamentelor ALLEVYN GENTLE BORDER, ca parte a unui program de profilaxie impotriva dezvoltarii unei escare de decubit, nu exclude necesitatea de a continua sa se elaboreze si sa fie urmat un protocol cuprinzator de prevenire a escarelor de decubit, (de exemplu, repositionarea regulata, suprafețe de sprijin adecvate, ingrijirea pielii si evaluari frecvente ale pielii).
- Din cauza adezivului delicat utilizat, nu utilizati acest pansament pentru a fixa alte dispozitive medicale pe pacient
- Daca apare inrosire sau sensibilizare, intrerupeti utilizarea si consultati un profesionist din domeniul sanatatii.
- Daca taiati pansamentul, veti compromite bariera bacteriana si proprietatile impermeabile ale pansamentului.
- Nu scutundati pansamentul in apa.
- Nu utilizati impreuna cu agenti oxidanti, cum ar fi solutiile de hipoclorit (de exemplu, EUSOL) sau apa oxigenata, deoarece acestea pot reduce capacitatea de absorbtie a pansamentului.
- Se utilizeaza o singura data si nu trebuie reutilizat, deoarece se poate produce o contaminare incrucisata sau o infectie, iar pansamentul poate fi inefficient.
- Odata deschise, nu pastrati pansamentele neutilizate pentru a le aplica ulterior.
- Daca se utilizeaza pe plagi infectate, infectia trebuie tratata in conformitate cu protocolul clinic local.

Pansamentele ALLEVYN GENTLE BORDER sunt destinate utilizarii de catre profesionistii din domeniul sanatatii sau de catre pacienti sub indrumarea unui profesionist din domeniul sanatatii.

Atunci cand este necesar, profesionistii din domeniul sanatatii trebuie sa ofere recomandari adecvate pacientilor privind modul de aplicare si de monitorizare a pansamentului, de indepartare si de eliminare a pansamentului si momentul in care trebuie sa contacteze un profesionist din domeniul sanatatii, astfel cum este detaliat in aceasta brosură.

## Instructiuni de utilizare

1. Curatati locul de aplicare. Asigurati-va ca pielea inconjuratoare este curata, uscata si fara par in exces.
2. Alegeti dimensiunea adecvata a pansamentului. Asigurati-va ca tamponul absorbant acopera intreaga plaga sau zona care trebuie protejata. Scala de pe punga este strict in scop orientativ. Evitati contactul ambalajului cu plaga.
3. Mai intai scoateti pelicula de protectie si lipiti partea adeziva a pansamentului pe piele. Daca aplicati pansamentul in zona sacrala, amplasati capatul ingust la minimum 2 cm deasupra sfincterului anal, apoi neteziti pansamentul peste zona sacrala.
4. Scoateti pelicula/peliculele protectoare ramasa/ramase. Neteziti. Daca il utilizati deasupra unei plagii, asigurati-va ca tamponul absorbant acopera plaga.
5. Neteziti marginile. Asigurati-va ca nu exista cute care ar putea compromite etansarea. Pansamentul poate fi repositionat dupa caz.
6. Pansamentele ALLEVYN GENTLE BORDER pot fi taiate special pentru a pansa plagile de pe calcai, coti si alte zone incomode. Folositi intotdeauna o tehnica curata atunci cand taiati pansamentul.
6. Daca taiati pansamentul, veti compromite bariera bacteriana si proprietatile impermeabile ale pansamentului. Asigurati-va ca orice zona de spuma expusa este acoperita cu o pelicula adecvata de pansament, avand grija sa nu acoperiti intregul pansament.

Pentru asistenta suplimentara privind aplicarea si sacrala consultati diagramele de pe ambalajul sau cutia pansamentului.

In cazul plagilor necrotice sau descumarte, pansamentele ALLEVYN GENTLE BORDER pot fi utilizate impreuna cu pansamentele cu hidrogel pentru plagi INTRASTE GEL.

**Observare: cand este posibil pentru prevenirea escarelor de decubit:** verificati frecvent pielea pentru semne de escare prin ridicarea unui colt, verificand si apoi repositionand pansamentul.

**Indepartare:** Ridicati un colt si dezlipiti incet pana cand este complet indepartat.

Eliminati pansamentele ALLEVYN GENTLE BORDER in conformitate cu protocoalele clinice locale sau aruncati in mod igienic dupa utilizare.

## Frecventa schimbarii pansamentului

In primele etape ale tratamentului, inspectati frecvent pansamentele ALLEVYN GENTLE BORDER.

Pansamentele ALLEVYN GENTLE BORDER pot fi lasate pe plaga timp de pana la 7 zile, cu exceptia zonei sacrale, unde pansamentele pot fi lasate pe plaga timp de pana la 5 zile. Pansamentele ALLEVYN GENTLE BORDER trebuie schimbate in functie de starea plagii si a pielii inconjuratoare sau pana cand exsudatul este vizibil si se apropie pana la 0.5 cm de marginea pansamentului, oricare dintre acestea are loc mai devreme. Decizia privind momentul schimbarii pansamentului trebuie sa depinda de o evaluare clinica si de protocoalele locale, sub indrumarea unui profesionist din domeniul sanatatii.

Daca in timpul utilizarii acestui dispozitiv considerati ca a avut loc un incident grav, va rugam sa il raportati producatorului si autoritatii dumneavoastra competente.

Complaints@Smith-Nephew.com

## Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiune	Disponibilitate	Cod	Dimensiune	Disponibilitate
66800269	7,5cm x 7,5cm	Cutie de 10	66800975	15cm x 15cm	Cutie de 10
66800270	10cm x 10cm	Cutie de 10	66800273	17,5cm x 17,5cm	Cutie de 10
66800900	110cm x 20cm	Cutie de 10	66800897	Pansament sacral 16,8cm x 17,1 cm	Cutie de 6
66800264	10cm x 25cm	Cutie de 10	66800898	Pansament sacral 16,8cm x 17,1 cm	Cutie de 10
66800265	10 cm x 30 cm	Cutie de 10	66800959	Multisitusun 17,1 cm x 17,9 cm	Cutie de 10
66800272	12,5 cm x 12,5 cm	Cutie de 10	66801031	Pansament sacral 21,6 cm x 23 cm	Cutie de 10
66802142	12,5 cm x 12,5 cm	Cutie de 3	66800506	Calcai 23 cm x 23,2 cm	Cutie de 5

CE  
2797

10601821 37264

## Producator

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hassle Road, Hull HU3 2BN England Marca comerciala a Smith&Nephew. Data emiterii 08/2022 Revizuire 01. Este posibil ca acest produs sa fie acoperit de unul sau mai multe brevete SUA. [www.smith-nephew.com/patents](http://www.smith-nephew.com/patents)

## Importator

Medical Ortovit srl \* str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1  
Telefon: (+40) 21 222.80.67 / 68 / 69 \* 0731.493.261 \* 0727.301.021  
Fax: (+40) 21 222.80.72 \* E-mail: [office@ortovit.eu](mailto:office@ortovit.eu) \* Web: [www.ortovit.eu](http://www.ortovit.eu)  
Magazin online [www.ortovit.eu/magazin](http://www.ortovit.eu/magazin)

