


Pansament compozit din spuma poliuretanică hidrocelulară cu gel siliconic adeziv

Descriere

Pansamentele ALLEVYN LIFE sunt pansamente compozite din spuma poliuretanică hidrocelulară cu gel siliconic adeziv. Compresa absorbantă are un strat de spuma și un miez blocant din material super absorbant. Deasupra centrului compresei există un strat fin, pansamentul este respirabil și are o peliculă superioară impermeabilă.

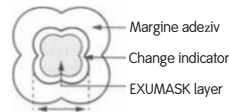

Strat blocant hiper-absorbant EXULOCK

Mod de acționare

Pansamentele ALLEVYN LIFE au un strat cu adeziv siliconic perforat de contact cu plaga, care permite exsudatului să treacă prin acesta până la stratul de spuma. Stratul adeziv din gel siliconic este bland, adecvat pentru utilizarea pe pielea fragilă și se face ca pansamentul să fie ușor de aplicat, de repositionat și de îndepărtat. Stratul din spuma absorbă exsudatul din plagă și din zona plagii, iar stratul hiper-absorbant EXULOCK® absorbă exsudatul și îl ajută să se răspândească în lateral pe pansament, utilizând treptat întreaga suprafață a pansamentului pentru a bloca exsudatul, ajutând la controlul mirosului. Pelicula permeabilă superioară permite evaporarea și ajută la prevenirea contaminării bacteriene a plagii. Stratul absorbant și cel respirabil permit crearea unui mediu umed al plagilor despre care s-a demonstrat că favorizează vindecarea mai rapidă a plagilor exsudative mici sau mari. Stratul de mascare EXUMASK® maschează vizual exsudatul inestetic și oferă un indicator vizual al momentului în care este necesară schimbarea pansamentului.

Indicații

- Gestionarea plagilor cu vindecare secundară a plagilor superficiale, în curs de granulare, plăgi exsudative cronice și acute, a plagilor de grosime completă și parțială inclusiv:
 - Escare de decubit;
 - Escare la nivelul picioarelor;
 - Ulceratii ale piciorului diabetic;
 - Plăgi chirurgicale;
 - Arsuri de gradul unu și doi;
 - Sîsururi donatoare;
 - Rupturi tegumentare;
 - Ulceratii fungice
- Prevenirea escarelor de decubit pe pielea intactă ca parte a unui protocol de prevenire a escarelor de decubit.

Precauții:

- Nu tăiați compresa absorbantă, deoarece componentele interne ale pansamentului pot contamina plagă, ducând la întârzierea vindecării.
- Nu scufundați pansamentul în apă.
- Nu utilizați împreună cu agenți oxidanți, cum ar fi soluțiile de hipoclorit (de exemplu, EUSOL) sau apă oxigenată, deoarece acestea pot reduce capacitatea de absorbție a pansamentului.
- Dacă apare înroșire sau sensibilizare, întrerupeți utilizarea.
- Utilizarea pansamentelor ALLEVYN LIFE ca parte a unei terapii profilactice de prevenire a escarelor de decubit nu exclude necesitatea de a continua elaborarea și urmarea unui protocol cuprinzător de prevenire a escarelor de decubit (de exemplu, repositionarea regulată, o saltea corespunzătoare și îngrijirea pielii).
- De unica folosință, utilizarea la mai mulți pacienți poate duce la contaminare încrucișată sau infecție. Odată deschise, nu potrăți pansamentele neutilizate pentru a le aplica ulterior.
- În cazul în care produsul este utilizat pe plăgi infectate, infecția trebuie inspectată și tratată conform protocolului clinic local.

Pentru mai multe informații vizitați: www.smith-nephew.com

Dacă în timpul utilizării acestui dispozitiv considerați că a avut loc un incident grav, va rugăm să îl raportați producătorului și autorității dumneavoastră competente.

complaints@smith-nephew.com

- Pansamentele sunt destinate utilizării de către profesioniști din domeniul sănătății sau de către pacienți sub îndrumarea unui profesionist din domeniul sănătății. Atunci când este necesar, profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să ofere recomandări adecvate pacienților privind modul de aplicare și de monitorizare a pansamentului, de îndepărtare și de eliminare a pansamentului și momentul în care trebuie să contacteze un profesionist din domeniul sănătății, astfel cum este detaliat în această broșură.

Instrucțiuni de utilizare: Curățați locul de aplicare. Asigurați-vă că pielea înconjurătoare este curată, uscată și fără par în exces.

- Alegeți dimensiunea adecvată a pansamentului. Asigurați-vă că compresa absorbantă acoperă întreaga plagă sau zona care trebuie protejată. Scala de pe pungă este strict în scop orientativ.



- Scoateți prima folie de protecție și lipiți partea adezivă a pansamentului pe piele.



- Scoateți folia/foliile ramase/ramase. Neteziți. Dacă îl utilizați deasupra unei plăgi, asigurați-vă că compresa absorbantă acoperă plagă. Nu întindeți pansamentul.



- Neteziți marginea. Asigurați-vă că nu există cute care ar putea compromite etanșarea. Pansamentul poate fi repositionat după caz.



Pansamentele ALLEVYN LIFE pot fi utilizate împreună cu INTRASITE® GEL Hydrogel pentru plagile necrotice sau cu crusta.

Observație: atunci când se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit, verificați frecvent pielea pentru a vedea dacă există semne de escare prin ridicarea unui colț, verificând și apoi repositionând pansamentul.

Îndepărtare: ridicați un colț și deslipiți încet până când este complet îndepărtat.

Eliminați în conformitate cu protocoalele clinice locale sau aruncați în mod igienic după utilizare.

Frecvența schimbării pansamentului:

În primele etape ale tratamentului, verificați frecvent pansamentul. Pansamentele pot fi lasate pe plagă timp de maxim 7 zile, cu excepția zonei sacrale, unde pansamentele pot fi lasate pe plagă maxim 5 zile. Pansamentele trebuie schimbate în funcție de starea plagii și a pielii înconjurătoare sau atunci când exsudatul acoperă 75% din indicatorul de schimbare. Aveți în vedere schimbarea în cazul în care exsudatul acoperă mai mult de 50% din indicatorul de schimbare. Diagrama de mai jos este doar orientativă, iar decizia privind momentul schimbării pansamentului trebuie să depindă de evaluarea clinică și de protocoalele locale, sub îndrumarea unui profesionist din domeniul sănătății:



Disponibilitatea produsului

Cod

66801067 10,3cm x 10,3cm
66801068 12,9cm x 12,9cm
66801069 15,4cm x 15,4cm
66801070 21cm x 21cm
66803091 12,9cm x 12,9cm

Disponibilitate

Cutie de 10
Cutie de 10
Cutie de 10
Cutie de 10
Pungă de 3 buc.

Disponibil, de asemenea, în gama ALLEVYN LIFE :

66801304 Călcâi 25cm x 25,2cm
66801306 Sacrum mic 17,2cm x 17,5cm
66801307 Sacrum mare 21,6cm x 23cm

Cutie de 5
Cutie de 10
Cutie de 10



18902776 43092

Producător

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hesse Road, Hull HU3 2BN England
©Mărci comerciale ale Smith+Nephew. Data emiterii 05/2024. Revizuire 02. Este posibil ca acest produs să fie acoperit de unul sau mai multe brevete S.U.A. www.smith-nephew.com/patents

Importator

Medical Ortovit srl * str. Miron Costin nr. 8, 011098 București, sector 1
Telefon: (+40) 21 222.80.67 / 68 / 69 * 0731.493.261 * 0727.301.021
Fax: (+40) 21 222.80.72 * E-mail: office@ortovit.eu * Web: www.ortovit.eu
Magazin online www.ortovit.eu/magazin

Smith & Nephew Operations B.V.,
Bloeilaan 2, 2132 NP Hoofddorp, Netherlands

