



## Pansament adeziv din spuma poliuretanică

### Descriere

ALLEVYN ADHESIVE prezintă o construcție avansată cu strat triplu care combină un tampon hidrocelular absorbant între un strat de contact cu plaga adeziv perforat și o peliculă superioară rezistentă la apă extrem de permeabilă care ajută la prevenirea contaminării bacteriene a plagii.

### Mod de funcționare

Structura cu strat triplu a pansamentelor ALLEVYN ADHESIVE facilitează gestionarea dinamică a fluidelor pentru a ajuta la menținerea unui mediu curativ umed la nivelul plagii, care promovează vindecarea și poate contribui la minimizarea riscului de macerare. Pelicula superioară ajută la prevenirea infiltrării de fluide și bacterii. Pansamentul poate fi lăsat pe plaga fără necesitatea unei fixări secundare și este atât de ușor de aplicat, cât și de îndepărtat.

### Indicații

Gestionarea plagilor cu vindecare secundară a plagilor superficiale, în curs de granulare, a plagilor exsudative cronice și acute, adânci și medii, cum ar fi ulcerările de decubit, escarele la nivelul picioarelor, ulceratii ale piciorului diabetic, plagi maligne, plagile chirurgicale, situsuri donoare și ulceratii fungice. ALLEVYN ADHESIVE poate fi utilizat împreună cu INTRASITE Gel pentru plagile necrotice sau moi.

### Precauții

- Nu utilizați pansamentele ALLEVYN ADHESIVE împreună cu agenții oxidanți, cum ar fi soluțiile de hipoclorit (de exemplu, EUSOL) sau apă oxigenată, deoarece acestea pot reduce capacitatea de absorbție a pansamentului.
- La fel ca în cazul tuturor produselor adezive, pot apărea cazuri de iritație și/sau macerare a pielii din jurul plagii. Au fost raportate rar cazuri de sensibilitate la pansament. Dacă apare înroșire sau sensibilizare, întrerupeți utilizarea și consultați un profesionist din domeniul sănătății.
- Trebuie reținut faptul că utilizarea incorectă sau schimbarea prea frecventă a pansamentului, în special la pacienții cu piele sensibilă, poate duce la desprinderea pielii.
- Pansamentele ALLEVYN ADHESIVE sunt produse de unică folosință. Dacă se utilizează la mai mult de un pacient, poate apărea contaminarea încrucișată. Deschiderea ambalajului pansamentului compromite bariera sterilă și, prin urmare, se recomandă ca orice pansament neutilizat să nu fie păstrat pentru o utilizare ulterioară.
- Dacă se utilizează pe plagi infectate, infecția trebuie tratată în conformitate cu protocolul clinic local.

### Instrucțiuni de utilizare

- Curățați plaga conform protocolului clinic local.
- Alegeți o dimensiune adecvată a pansamentului. Pansamentele ALLEVYN ADHESIVE pot fi tăiate pentru a se adapta la zonele dificile. Folosiți întotdeauna o tehnică curată atunci când tăiați pansamentul.
- Pregătiți și curățați tegumentul din jurul plagii și îndepărtați umezeala în exces. Orice par în exces trebuie ras pentru a asigura contactul strans cu plaga. Înainte de aplicarea pansamentelor ALLEVYN ADHESIVE pot fi utilizate servetelele SKIN-PREP unde este vorba despre piele fragilă.
- Folosind o tehnică curată, îndepărtați una din foliile de protecție de pe pansamentele ALLEVYN ADHESIVE și fixați partea adezivă a pansamentului pe piele.
- Îndepărtați folia protectoră ramasă și neteziți pansamentul peste partea ramasă a plagii fără să îl întinziți, asigurându-vă că nu se formează cute. Zona captusită a pansamentului trebuie să fie lipită pe toată suprafața plagii.
- În cazul în care pansamentul a fost tăiat, asigurați-vă că orice zonă de spumă expusă este acoperită cu o peliculă adecvată de pansament, având grijă să nu acoperiți întregul pansament.
- Când aplicați pansamentul ALLEVYN Sacrum, amplasați capatul îngust la minimum 2 cm deasupra sfîcterului anal, apoi neteziți pansamentul peste zona sacră.

### Frecvența schimbării pansamentului

În primele etape ale managementului plagilor, pansamentele ALLEVYN ADHESIVE trebuie inspectate în conformitate cu protocolul clinic local. Pansamentele pot fi lăsate pe plaga timp de până la 7 zile în funcție de starea plagii și a pielii înconjurătoare sau până când exsudatul este vizibil și se apropie până la 0,5 cm de marginea tamponului pansamentului, oricare dintre acestea are loc mai devreme. Dacă pansamentele se aplică în zona sacră, pot fi lăsate peste plaga timp de până la 5 zile; cu toate acestea, din cauza potențialului ridicat de contaminare și infectare a zonei, poate fi necesară o monitorizare sporită a aderenței pansamentului, în conformitate cu protocoalele clinice locale. Decizia privind momentul schimbării pansamentului trebuie să se ia în funcție de evaluarea clinică și, de asemenea, trebuie luate în calcul și protocoalele locale.

### Îndepărtare

Pentru a îndepărta pansamentul ALLEVYN ADHESIVE, ridicați o margine a pansamentului și dezlipiți ușor până când îl îndepărtați complet de pe plaga. Pansamentele sacrale trebuie îndepărtate începând dinspre marginea de sus spre anus, pentru a reduce la minimum posibilitatea de contaminare cu fecale.

Grădita de pe pungă are doar rol orientativ pentru a ajuta la selectarea pasturei și trebuie acordată o atenție specială pentru a evita contaminarea încrucișată.

### Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiune	Disponibilitate
66000043	7.5cm x 7.5cm / 3in. x 3in.	Carton de 10
66000599	10cm x 10cm / 4in. x 4in.	Carton de 10
66000044	12.5cm x 12.5cm / 5in. x 5in.	Carton de 10
66000045	17.5cm x 17.5cm / 7in. x 7in.	Carton de 10
66000744	12.5cm x 22.5cm / 5in. x 9in.	Carton de 10
66000046	22.5cm x 22.5cm / 9in. x 9in.	Carton de 10
66000801	15cm x 15cm / 6in. x 6in.	Carton de 10
66000451		
Pansament pentru sacru 22cm x 22cm / 9in. x 9in.		Cutie de 10
66000700		
Pansament pentru sacru 17cm x 17cm / 6 1/2in. x 6 1/2in.		Cutie de 10



10601770 34900

### Producător

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England

Marci comerciale ale Smith & Nephew. Data emiterii 01/2023.

Este posibil ca acest produs să fie acoperit de unul sau mai multe brevete S.U.A.

www.smith-nephew.com/patents

### Importator

Medical Ortovit srl \* str. Miron Costin nr. 8, 011098 București, sector 1

Telefon: (+40) 21 222.80.67 / 68 / 69 \* 0731.493.261 \* 0727.301.021

Fax: (+40) 21 222.80.72 \* E-mail: office@ortovit.eu \* Web: www.ortovit.eu

Magazin online www.ortovit.eu/magazin

