

Pansament pentru plagi cu hidrogel cu 78% apa g/g

Descriere

Hidrogelul INTRASITE[®] GEL este un hidrogel amorf transparent care contine polimer carboximetil celuloza modificat si cu 78% apa g/g. Se prezinta sub forma unui ansamblu doзатор cu o singura doza pentru aplicare usoara.

Mod de functionare

Hidrogelul INTRASITE GEL favorizeaza debridarea delicata prin autoliza prin rehidratarea tesutului necrotic. Hidrogelul INTRASITE GEL favorizeaza un mediu umed al plagii si este neaderent.

Indicatii

Hidrogelul INTRASITE GEL este indicat pentru indepartarea tesuturilor neviabile din plagi superficiale, subminate sau profunde (care includ ulcere de presiune, ulcere la nivelul picioarelor, ulcere la nivelul diabetic, plagi maligne, arsuri, plagi chirurgicale deschise, opariri, laceratii, zgarieturi si ulcere fungice). De asemenea, este indicat pentru tratamentul plagilor cavitatii granulare si al leziunilor produse de radiatii.

Contraindicatii

Nu utilizati daca exista sensibilitate cunoscuta la hidrogelul INTRASITE GEL sau la oricare dintre ingredientele acestuia.

Utilizatori vizati

Pansamentele sunt destinate utilizarii numai de catre profesionisti din domeniul sanatatii

Precautii

Asigurati-va ca gelul rezidual este indepartat inainte de radioterapie. Daca apar semne de iritare sau sensibilitate, intrerpeti utilizarea. Hidrogelul INTRASITE GEL trebuie utilizat cu atentie in apropierea ochilor si in plagi adanci cu deschideri inguste (de exemplu, fistule si plagi cavitate). Hidrogelul INTRASITE GEL este destinat numai uzului extern. PERICOL DE SUFOCARE - eliminati cu atentie capacul de protectie si varful care se rupe. Evitati ingerarea. Evitati utilizarea pe mameloane crapate. Hidrogelul INTRASITE GEL este exclusiv de unica folosinta si nu trebuie reutilizat, deoarece se poate produce o contaminare incrucisata sau o infectie, iar pansamentul poate fi inefficient. Deschiderea dozatorului APPLIPAK[®] compromite bariera sterila si, prin urmare, orice gel neutilizat nu trebuie pastrat pentru utilizare ulterioara.

Instructiuni de utilizare

Daca hidrogelul INTRASITE GEL se utilizeaza pe plagi infectate, infectia trebuie tratata in conformitate cu protocolul clinic local.

Pregatiti locul plagii:

1. Indepartati pansamentul secundar. Irigati plaga cu solutie salina sterila pentru a curata locul plagii.

2. Pregatiti pachetul:

Indepartati capacul de protectie de pe duza. Curatati varful cu se rupe si duza dozatorului cu un tampon antiseptic adecvat. Rupeti varful cu model de pe duza.

3. Introduceti hidrogelul INTRASITE GEL in plaga:





Tinand varful duzei departe de suprafata plagii, apasati usor bulbul dozatorului pentru a distribui gelul in plaga, evitand scurgerea excesiva pe pielea din jur.

Aplicati uniform hidrogelul INTRASITE GEL pe suprafata plagii la o adancime de aproximativ 5 mm. Eliminati orice gel nefolosit.

4. Pansati plaga:

Acoperiti cu un pansament secundar la alegere, de exemplu: Plasture pe suport de folie transparenta OPSITE[®] FLEXIGRID[®], pansamente hidrocelulare pentru plagi ALLEVYN[®], pansament absorbant cu aderența redușă MELOLIN[®].

Eliminati in conformitate cu protocoalele clinice locale sau aruncati in mod igienic dupa utilizare.

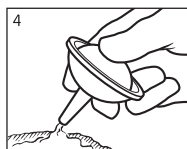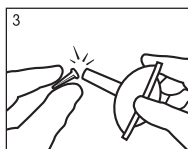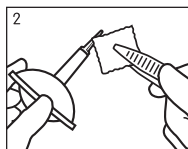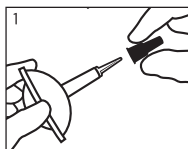

Frecventa schimbarii pansamentului

Pe plagile necrotice si cu crusta, se recomanda ca gelul sa fie schimbat cel putin o data la trei zile. Pe plagile curate granulare, frecventa schimbarii gelului depinde de starea clinica a plagii si de cantitatea de exsudat produsa.

Inlaturarea pansamentului

Hidrogelul INTRASITE GEL poate fi indepartat de pe plaga prin clătire cu solutie salina sterila. Daca hidrogelul INTRASITE GEL devine dificil de indepartat, inmuiati zona cu apa sterila sau solutie salina pentru a facilita indepartarea.

Daca in timpul utilizarii acestui dispozitiv considerati ca a avut loc un incident grav, va rugam sa il raportati producatorului si autoritatii dumneavoaștra competente.

complaints@smith-nephew.com

Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiune	Disponibilitate
7308	8 g	Cutie de 10
7311	15 g	Cutie de 10
7313	25 g	Cutie de 10
66800241	25 g	Cutie de 3

Producator

Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hesse Road, Hull, HU3 2BN England
 *Marcii comerciale ale Smith & Nephew. ©Smith & Nephew Data emiterii 08/2022. Revizuire 01
 Este posibil ca acest produs sa fie acoperit de unul sau mai multe brevete S.U.A.
 www.smith-nephew.com/

Importator

Medical Ortovit srl * str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1
 Telefon: (+40) 21 222.80.67 /68 /69 * 0731.493.261 * 0727.301.021
 Fax: (+40) 21 222.80.72 * E-mail: office@ortovit.eu * Web: www.ortovit.eu
 Magazin online www.ortovit.eu/magazin



10601657 35126

