

Pudra de cadexomer cu iod

Descriere

IODOSORB Powder este o pudra sterilă de culoare maro închis constând din cadexomer (granule de polimer modificat de amidon) cu iod. Granulele de cadexomer sunt biodegradabile. IODOSORB Powder va îndepărta excesul de exsudat și crustele din patul plăgii și va reduce bacteriile de pe suprafața plăgii. Facând acest lucru, pudra se transformă într-un gel moale.

Indicații

IODOSORB Powder este indicat pentru tratamentul topic al plăgilor cronice exsudative. IODOSORB Powder poate fi utilizat cu terapie compresivă. IODOSORB Powder poate fi folosit pe plăgile infectate. Acolo unde produsul este utilizat pe plăgile infectate, infecția trebuie verificată și tratată conform protocolului clinic local.

Contraindicații

IODOSORB Powder nu trebuie utilizat pe țesut necrotic uscat sau la pacienții cu sensibilitate cunoscută la Iod sau la oricare dintre celelalte componente. A nu se folosi IODOSORB Powder la copii, femei însărcinate sau care alăptează sau la persoane cu insuficiență renală sau tulburări tiroidiene (de exemplu: Tiroidita Hashimoto sau Gusa nodulară non toxică).

Avertizări

Există un risc potențial de interacțiune cu Litliul, ceea ce duce la o posibilitate crescută de hipotiroidism. A nu se folosi IODOSORB Powder concomitent cu antiseptice pe bază de mercur sau taurolidina. Dacă pacientul urmează să fie supus unor teste ale funcției tiroidiene, trebuie să informeze medicul.

Precauții de utilizare

- Conținutul pachetului trebuie folosit doar la un singur pacient.
- A nu se folosi IODOSORB Powder în vecinătatea ochilor, urechilor, nas sau gura.
- Produsul este doar pentru uz extern
- IODOSORB Powder poate cauza o ușoară durere tranzitorie în prima oră după aplicarea tratamentului. Acesta este un semn că produsul începe să curete plaga. Ocazional, IODOSORB Powder poate provoca umflarea sau înroșirea pielii din jurul marginilor plăgii. De obicei acest lucru trece. Dacă aceste simptome persistă sau dacă pacientul prezintă orice alte simptome, trebuie contactat medicul sau asistenta.
- Contactul cu pielea din jurul marginilor plăgii / pielea intactă trebuie redus la minim.
- Dacă pulberea este lăsată să se usuce, este posibil să se formeze o crustă aderentă.
- O singură aplicare de IODOSORB Powder nu trebuie să depășească 50 g (echivalentul a 16 x 3 g plicuri) și nu mai mult de 150 g (echivalentul a 50 x 3 g plicuri) aplicate într-o săptămână.
- Durata tratamentului nu trebuie să depășească 3 luni.

Instrucțiuni de utilizare

Aplicare IODOSORB Powder

1. Spălați bine mâinile înainte și după aplicare. Folosind manși, curățați plaga și zona înconjurătoare fie cu un jet ușor de apă sau cu soluție salină. NU USCAȚI suprafața plăgii.
2. Aplicați IODOSORB Powder pe suprafața plăgii pentru a forma un strat adânc de 3 mm care se adaptează la forma plăgii. Acoperiți complet plaga cu un pansament secundar adecvat. Dacă este necesar, aplicați bandaj compresiv. Orice pudră IODOSORB Powder rămasă trebuie aruncată deoarece nu mai este sterilă.

Schimbare IODOSORB Powder

1. IODOSORB Powder trebuie schimbat atunci când produsul devine saturat cu lichidul din plaga și toată cantitatea de Iod a fost eliberată. Acest lucru este indicat de pierderea culorii, de obicei de 2 – 3 ori pe săptămână. Dacă plaga este foarte exsudativă, poate fi necesară schimbarea zilnică. Dacă este necesar, înmuiați pansamentul câteva minute, apoi îndepărtați.
2. Îndepărtați ușor IODOSORB Powder folosind un jet de apă sau ser fiziologic.
3. Ștergeți ușor orice exces de fluid, lăsând suprafața plăgii ușor umedă, înainte de reaplicarea IODOSORB Powder.

Disponibilitate produs

Cod

66001286

7 x 3g



28402 0150204

Producător

Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN England
Marci comerciale ale Smith & Nephew ©Smith & Nephew ©Smith & Nephew
Data emiterii 12/2020
www.smith-nephew.com www.iodosorb.com

Importator

Medical Ortovit srl * str. Miron Costin nr. 8, 011098 București, sector 1
Telefon: (+40) 21 222.80.67 / 68 / 69 * 0731.493.261 * 0727.301.021
Fax: (+40) 21 222.80.72 * E-mail: office@ortovit.eu * Web: www.ortovit.eu
Magazin online www.ortovit.eu/magazin

